

SleepAngel® medicinske produkter

Rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner for puder

SleepAngel®-produkterne er klar til brug med det samme. Produktet er ikke steriliseret.



1. Tiltænkt formål/teknologi

SleepAngel®-produkterne er hermetisk forseglede:

- PureShield-stofbeskyttelse: slidstærkt, blødt og højtydende tekstil, der blokerer for forurenende stoffer. Dampgennemtrængeligt og vandtæt.
- SafeWeld-sømme: forseglede sømme giver en komplet barriere – ingen syningshuller.
- PneumaPure®-filter: Åndbart mekanisk filter, der tillader ren luft at strømme ind i puden, men blokerer for patogener og allergener.

2. Inspektion og rengøring

Før brug af produktet:

- Rengør produktet (se ovenfor)
- Undersøg visuelt produktets sømme, betræk/stof og filtre for skader eller huller. Et produkt med huller eller beskadiget stof eller filter er forurenet og skal bortskaffes.

Ved daglig brug:

- Undersøg visuelt produktets sømme, stof og filtre for skader eller huller.
- Et produkt med huller eller beskadiget stof eller filter skal bortskaffes.
- Rengør puden mindst én gang om ugen, efter udskrivning af hver patient eller ved tilsmudsning.
- Pudens fyld bør rystes op for at bevare fyldets volumen.
- Sørg for, at alle rengørings- og desinfektionsmidler, der anvendes, overholder producentens retningslinjer.
- Rengør med en mild opløsning af rengøringsmiddel og vand.

- Lad produktet tørre.
- Produktet er nu klar til brug.

Bemærk:

- Undgå slibende skrubning af filter og stof.
- Produktet må ikke bleges, maskinvaskes, renses, tørretumbles eller stryges.



Brug af alkoholservietter og rengøringsmidler kan midlertidigt ændre overfladen på betrækket.

3. Auditværktøj

Fjern puden fra eventuelt aftageligt betræk og kontroller følgende:

- Filteret er intakt
- Sømme er hele
- Pudens er fri for pletter
- Pudens har ingen synlige rifter eller skader
- Pudens har ingen ubehagelig lugt
- Pudens kerne er fyldig og modstandsdygtig

Hvis en af ovenstående betingelser ikke er opfyldt, har puden ikke bestået kontrollen og skal udskiftes.

4. Opbevaring og instruktioner til læsning af LOT

- Pudens kan opbevares fladt eller på siden. Undgå at bøje puden, da det kan beskadige PneumaPure®-filteret.
- Undgå at placere vægte ovenpå produktet.
- Opbevar på et tørt sted ved temperatur mellem +10...+30 °C.

Instruktioner til læsning af LOT:

Eksempel LOT 11110722:

- 1111 – produktionsnummer
- 07 – produktionsmåned
- 22 – år

5. Bortskaffelse og genanvendelse

For at bortskaffe puden, skær den op og fjern den indvendige pude. Begge dele bortskaffes som medicinsk affald.

Gabriel Scientific OÜ

Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia

Tel: +372 56605967 www.SleepAngel-Medical.com info@SleepAngel-Medical.com

SleepAngel®

SleepAngel® medicinske produkter

Rengørings- og vedligeholdelsesinstruktioner for puder

SleepAngel®-produkterne er klar til brug med det samme. Produktet er ikke steriliseret.

Rengørings- og desinfektionsmidler, der kan anvendes:

- 1% Hydrogenperoxid-opløsning
- Ammoniumforbindelser
- Aniospray Quick
- Antifect extra
- AntiGone
- Bacillol AF
- Bacillol Foam
- Bactacid servietter
- Chemisept servietter
- Klorindioxid-opløsning, 10.000 ppm (må anvendes ved kraftig tilsmudsning, rengør efterfølgende med en fugtig klud)
- Klorindioxid-opløsning, 1000 ppm
- Klorfrigivende opløsning, 1000 ppm
- Clinell alkoholservietter
- Clinell sporicidserviet
- Clinell universal spray
- Cavi Cide overfladedesinfektionsmiddel
- Cavi servietter
- Descosept PUR servietter RTU
- Ecopine, (5% opløsning i vand)
- Incidin Foam & Incidin Plus
- Incidin OxyFoam S
- Incidin OxyWipes
- Incidin Pro
- Isopropylalkohol, 70%
- Kohrsolin FF
- Life Clean
- Meliseptol Rapid
- Microbac Forte
- Mikrozid AF væske
- Mikrozid Sensitive væske
- Mikrozid Sensitive servietter
- Oxivir Plus
- Perform 1% og 3%
- Fenol-opløsning, 1%
- PDI Sani Cloth AF3 servietter
- Pursept AF
- Rely+ON Perasafe
- Rely+ON Virkon
- Sani-Cloth Active
- Spray Off
- Sterisept servietter
- Super Sani Cloth desinficerende engangsserviet
- Terralin® protect (maks. 4%)

- TPH Protect
- Virusolve (5% & 10% opløsning i vand)
- Vådserviet

Bemærk: Efter brug af rengøringsmidler med klor anbefales det at aftørre overfladerne med en fugtig klud, da klor ved langtidsbrug kan beskadige betrækkets overflade og gøre det mere sårbart over for mekaniske skader.

Rengørings- og desinfektionsmidler, der ikke anbefales til brug:

- Disclean ENDO PAA (pereddikesyre-opløsning)
- PDI Sani-Cloth Bleach desinficerende engangsserviet
- Pereddikesyre

Denne liste er ikke udtømmende.

Følg altid og overskrid ikke de koncentrationer, der er angivet i instruktionerne.

